

Emser® Nasendusche – Anwendungsempfehlung:



Vorbeugung vor Erkältungskrankheiten		✓
Akuter und chronischer Schnupfen	✓	
Chronische Nasen- und Nasennebenhöhlen-entzündungen	✓	
Pollen- und Hausstaub-allergie		✓
Starke Staubbelastung		✓
Regelmässige Schleimhautpflege		✓
Trockene Nase		✓

Emser® Nasendusche mit Emser Salz®

- 100 % natürliche Wirkweise
- Bekämpft die Ursache und lindert die Symptome
- Befeuchtet und reinigt die trockene Nasenschleimhaut



Emser Salz® wirkt 3-fach stark:

- ✓ Emser Salz® verflüssigt zähes Sekret und aktiviert die Selbstreinigungsmechanismen der Nasenschleimhaut.
- ✓ Der spezielle Mineralstoffkomplex des Emser Salzes® puffert saure Stoffwechselprodukte und lindert dadurch Entzündungszeichen.
- ✓ Durch die im Emser Salz® enthaltenen Mineralstoffe und Spurenelemente wird die Wundheilung unterstützt.



EMSER® – GESUNDHEITSPRODUKTE FÜR DIE GANZE FAMILIE



In Ihrer Apotheke und Drogerie!

NATÜRLICH ERSTMAL EMSER®

Emser Salz®:

Zur Behandlung von akuten und chronischen katarrhalischen Erkrankungen der Nase und Nasennebenhöhlen, des Rachens, des Kehlkopfes und der Bronchien; zur Inhalation, zur Nasenspülung, zur Spülung des Mund- und Rachenraumes sowie zum Gurgeln.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Sidroga AG, Weidenweg 15, CH-4310 Rheinfelden
www.emser.ch
#freeyoumose

Folge uns auf Instagram:
@emser_nasendusche, #freeyoumose



EMSER® – DAS 1x1 DER NASENSPÜLUNG



532071_CHD911



NASENSPÜLUNG – WOHLTUEND UND BEFREIEND

Regelmässige Nasenspülungen sorgen für ein angenehmes und freies Gefühl im Nasenbereich.

Nasenspülen

- Unterstützung der natürlichen Reinigungsfunktion der Nase
- Stärkung der Abwehrmechanismen
- Befeuchtung der Nasenschleimhaut
- Hilfe bei der Aufrechterhaltung der natürlichen Funktion

Nasenspülen mit isotonen Salzlösungen

- Bedenkenlos über eine längere Zeit anwendbar
- Ideal für die Behandlung häufig wiederkehrender Atemwegsinfekte
- Schonend und nebenwirkungsarm
- Auch während der Schwangerschaft

NASENSPÜLUNG MIT EMSER® – 100 % NATÜRLICHE WIRKWEISE

Emser® Nasendusche mit Emser® Salzen bekämpft die Ursache und lindert Symptome.

Nasenspülung mit Emser Salz®

- Bei banalen akuten Infekten der oberen Atemwege, wie Schnupfen
- Bei chronischer Nasennebenhöhlenentzündung



Nasenspülung mit Emser® Nasenspülsalz

- Zur täglichen Nasenpflege
- Zur Vorbeugung vor Erkältungskrankheiten
- Bei Pollen- und Hausstauballergie
- Bei trockener Nase durch z. B. Klimaanlage oder Heizungsluft



Die komplette Nase spülen

Optimale Spüldruckregulierung durch integriertes **Deckelventil**

Leicht komprimierbar

Hochelastischer, ergonomisch geformter **Spülbehälter**

Hygienisch, sicher, standfest

Zerlegbar, spülmaschinenfest und auskochbar, mit stabilem **Basisteil** mit Bajonettverschluss

Exakt abgestimmt

Praktische **Portionsbeutel** passend zur Füllmenge der Nasendusche



So einfach ist die Nase wieder sauber und befreit:

1. Nasenansatzstück waagrecht ausklappen & Nasendusche mit handwarmem Wasser befüllen.
2. Je nach Bedarf 1 Beutel Emser® Nasenspülsalz 2,5 g oder 1 Beutel Emser Salz® 2,95 g einfüllen & durch Schwenken auflösen. Nasenansatzstück bis zum Anschlag hochklappen.
3. Nasenansatzstück an ein Nasenloch ansetzen. Flüssigkeit fliesst in das eine Nasenloch hinein & läuft durch das andere wieder heraus. Sie läuft nicht in den Rachen, wenn Sie Ihren Mund während der Spülung weit öffnen.



Tipp:

Drückt man den Spülbehälter leicht zusammen, kann die Spüllösung nicht nur den unteren, sondern auch den mittleren und oberen Nasengang erreichen. Dort schliessen die Nasennebenhöhlen und das Geruchsorgan an.



Weitere Informationen sowie einen Film zur richtigen Anwendung finden Sie hier: www.emser.ch

