

# Multi-Mam® Kompressen

Multi-Mam®

LESEN SIE VOR JEDER ANWENDUNG VON MULTI-MAM KOMPRESSIONEN DIESES INFORMATIONSBLAATT SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES AUF.

## MULTI-MAM KOMPRESSIONEN FÜR DIE INTENSIVE PFLEGE UND BEHANDLUNG WUNDER UND GEREIZTER BRUSTWARZEN

- Unterstützen die natürliche Wundheilung
- Schnell kühlende und beruhigende Wirkung
- Verbessern den Gewebezustand der Brustwarzenhaut
- Neutralisieren schädliche Mikroorganismen
- Basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen (unbedenklich bei Verschlucken)

### ANWENDUNG BEI

- Durch das Stillen verursachten Problemen mit der Brustwarze
- Schmerzhaften, wunden oder geschwollenen Brustwarzen
- Bläschen, entzündeten Brustwarzen und Hautablösungen
- Unzureichender Feuchtigkeit der Brustwarzenhaut

### WIE WIRKEN MULTI-MAM KOMPRESSIONEN


Multi-Mam Kompressen wurden speziell für die intensive Pflege und Behandlung der Brustwarzen stillender Mütter entwickelt. Multi-Mam Kompressen haben eine schnell kühlende und beruhigende Wirkung auf schmerzhaften Brustwarzen, verbessern den Gewebezustand der Haut und reduzieren Schwellungen. Jede Komresse ist mit einem Gel getränkt, das den patentierten ZQR-Komplex enthält. Diese natürliche Substanz pflanzlichen Ursprungs hat die einzigartige Eigenschaft, das Gewebe vor dem Kontakt mit schädlichen Bakterien zu schützen. Die Multi-Mam Kompressen sind ein natürliches Produkte auf Basis des patentierten ZQR-Komplexes. Die Kompressen bilden einen angenehmen Schutz der Brustwarze und unterstützen durch optimale Bedingungen den natürlichen Heilungsprozess. Das Gel muss vor dem Stillen nicht entfernt werden. Das Gel besteht aus natürlichen, pflanzlichen Inhaltsstoffen und ist bei Verschlucken unbedenklich.

### ANWENDUNGSHINWEISE

Waschen Sie Ihre Hände. Öffnen Sie das Briefchen, entfalten Sie die Komresse und legen Sie die Seite mit dem Gel auf Ihre Brustwarze. Lassen Sie die Komresse so lange aufgelegt, wie nötig, aber mindestens 10 Minuten, besser 30 Minuten bis zu maximal einer Stunde. Auf der Brustwarze verbleibendes Gel muss vor dem Stillen nicht entfernt werden, da es auch bei Verschlucken unbedenklich für das Baby ist. Wiederholen Sie die Behandlung mindestens zweimal täglich bis die Irritationen verschwunden sind. Eine Komresse nur für eine Anwendung nutzen.

Die Kompressen sollten nicht länger als 30 Tage aufeinanderfolgend verwendet werden. Bei anhaltenden oder häufig wiederkehrenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Ihre Hebamme/Stillberaterin fragen.

### Anwendungshinweise

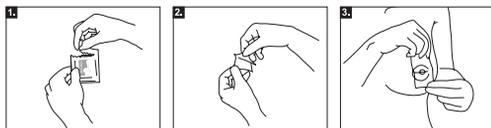

1. Öffnen Sie das Briefchen

2. Nehmen Sie die Komresse heraus

3. Legen Sie die Komresse mit der Gelseite auf die Brustwarze

## MULTI-MAM KOMPRESSIONEN BASIEREN AUF NATÜRLICHEN INHALTSSTOFFEN

Multi-Mam Kompressen sind ein natürliches Produkt, basierend auf dem patentierten ZQR-Komplex.

### WIRKSAMER INHALTSSTOFF

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer\*, Glycerin (plant origin), Xanthan Gum.

\*ZQR-Komplex: Patentierter Inhaltsstoff aus dem Blattextrakt der Aloe Barbadensis.

### INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

Allergische Reaktionen auf die Bestandteile der Multi-Mam Kompressen kommen nur sehr selten vor. Sollten Sie allergisch gegen bestimmte pflanzliche Stoffe sein, empfehlen wir Ihnen, eine kleine Menge des Gels auf die Innenseite Ihres Unterarms aufzutragen. Treten danach Juckreiz und Rötungen auf, sind Sie wahrscheinlich gegen einen der Bestandteile des Gels allergisch. Wir empfehlen dann, Multi-Mam Kompressen nicht zu verwenden.

### LAGERUNG

In der Originalverpackung bei Raumtemperatur zwischen 10°C und 25°C außer Reichweite von Kindern lagern. Verfallsdatum siehe Briefchenaufdruck und Verpackungsaufdruck.

### HINTERGRUNDINFORMATIONEN

#### Wunde Brustwarzen

Stillen ist der natürlichste Weg, Ihr Baby zu ernähren und es stellt sicher, dass Ihr Baby alle nötigen Nährstoffe erhält und sich sicher und geborgen fühlt. Das normale Saugen eines Babys verursacht immer sichtbare Veränderungen der Brustwarze, vor allem das Anschwellen. Probleme wie Wundsein, Schmerzen und geschwollene Brustwarzen treten sehr häufig beim Stillen auf. Ungefähr 80-95% aller stillenden Mütter erleben irgendeine Art von Schmerz, wobei 26% über sehr stark schmerzende Brustwarzen berichten. Das korrekte Anlegen und ein effizientes Saugen des Babys sind sehr wichtig, um Beschwerden zu vermeiden. Aber auch der Verlust der natürlichen Feuchtigkeit des Bereiches um die Brustwarze durch das Stillen, Seifen, Shampoo oder die allgemeine Tendenz zu trockener Haut können rissige Brustwarzen hervorrufen.

#### Richtiges Anlegen

Eine angenehme Stillfahung benötigt zuallererst ein richtiges Anlegen des Babys. Ist das Baby korrekt angelegt, verschwindet die gesamte Brustwarze und der Brustwarzenvorhof in seinem Mund, mit der Brustwarze an die Rückseite des Babymundes ausgerichtet. Die Zunge des Babys bedeckt dabei den unteren harten Gaumen und schützt so die Brustwarze vor Verletzungen.



PZN DE: 04952565  
PZN AT: 2648969

Hersteller:  
BioClin BV, Blaak 555  
3011 GB Rotterdam, The Netherlands

## WEITERE PRODUKTE VON MULTI-MAM

---

### Multi-Mam Lanolin

#### 100 % hochreines, natürliches Wollfett

---

- Beruhigt und schützt die Brustwarzen
- Hält die Haut weich, geschmeidig und gesund
- Hilft, das natürliche Hautfett zu ersetzen und zu ergänzen
- Hat einen neutralen Geschmack und Geruch

### MULTI-MAM BALSAM

#### Brustwarzenpflege auf pflanzlicher Basis

---

- Schützt und beruhigt die Brustwarzen
- Hält die Haut weich, geschmeidig und gesund
- Ersetzt und ergänzt die natürlichen Hautfette, die durch das Stillen entzogen werden
- Geschmacks- und geruchsneutral

### MULTI-MAM LACTAMAX

#### Nahrungsergänzung für stillende Mütter

---

- Mit Vitaminen und Fenchel-Extrakt
- Vitamine C und B12 helfen, Müdigkeit und Ermüdung zu verringern
- Vitamin D trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei
- Einfache Herstellung eines schmackhaften Getränks

### MULTI-MAM BABYDENT

#### Bei Zahngeschmerzen

---

- Schützendes Gel zur Linderung von Zahngeschmerzen
- Basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen
- Angenehm im Geschmack
- Zuckerfrei, Alkoholfrei & Vegan

### MULTI-MAM WOCHENBETT PADS - NEU

#### Gewebepflege nach der Geburt

---

- Ideal zur Anwendung im Intimbereich und auf der geschlossenen Kaiserschnittnarbe
- Wirken kühlend und beruhigend auf strapazierte Hautpartien
- Unterstützen den natürlichen Heilungsprozess
- Weiche, schützende Pads mit feuchtigkeitsspendendem Gel
- Basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen, enthalten den natürlichen 2QR-Komplex

## UND FÜR IHRE VAGINALE GESUNDHEIT: MULTI-GYN

---

Natürlich Hilfe bei Intimbeschwerden oder zur täglichen Intimhygiene. Multi-Gyn Produkte basieren auf dem innovativen und patentierten 2QR-Komplex extrahiert aus der Aloe Barbadensis.

### Multi-Gyn ActiGel\*

#### Zur Behandlung Bakterieller Vaginose (BV)

---

- Effektive Linderung
- Vermindert unangenehmen Geruch und Ausfluss
- Verbessert die Vaginalflora und optimiert den pH-Wert
- Mit natürlichen Inhaltsstoffen

### Multi-Gyn FloraPlus\*

#### Zur Behandlung von Scheidenpilzproblemen

---

- Linderung von Juckreiz, Reizungen und krümeligem, weißen Ausfluss
- Enthält Prebiotika
- Idealer pH-Wert für eine gesunde Vagina
- Basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen

### Multi-Gyn LiquiGel\*

#### Behandelt und lindert vaginale Trockenheit

---

- Schnelle Hilfe bei vaginaler Trockenheit
- Schützt vor Reizungen während des Geschlechtsverkehrs
- Fördert die natürliche Befeuchtung
- Auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe
- Hormonfrei

### Multi-Gyn Vaginaldusche und Tabletten

#### Für eine optimale Vaginalhygiene

---

- Spült effizient und schonend
- Integriertes Spezialventil verhindert das Zurückfließen der Spüllösung und einen zu starken Druck in der Vagina
- Ergonomisches Design zur Anwendung in beliebiger Position

### Multi Gyn FemiWash

#### Für die tägliche Intimpflege

---

- Seifenfreier Mikroschaum zur Anwendung im äußeren Intimbereich
- Sanft und pflegend, ohne Duftstoffe
- Mit dem natürlichen 2QR Komplex
- Auch zur sanften Intimrasur
- Für ca. 100 Anwendungen

[www.multi-gyn.de](http://www.multi-gyn.de)

[www.multi-gyn.at](http://www.multi-gyn.at)

\*Medizinprodukt: lesen Sie vor Gebrauch die Packungsbeilage

Erhältlich in jeder Apotheke und in Deutschland in gut sortierten Drogeriemärkten